



Le Standard

Vous avez été entendu, nous avons adapté le design du spéculum. Silencieux. Solide et fiable. Manipulation simplifiée, d'une seule main – sans aucun inconvénient. Qualité élevée, mais à usage unique. Une expérience plus positive pour la patiente. Une insertion facilitée et bien plus encore. Rencontrez Orchid Spec.

Intervention sans cliquetis

Verrouillage et déverrouillage faciles d'une seule main, sans agitation, ni cliquetis, ni autres bruits pouvant provoquer une crispation indésirable de la patiente.

Bords lisses et arrondis

Les risques de traumatismes tissulaires ou de saignements dus à des angles aigus sont révolus. Notre conception unique englobe des bords arrondis et lisses, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, ce qui améliore considérablement le confort de la patiente.

Soutien du col de l'utérus renforcé


Les bords repliés vers l'intérieur brevetés, combinés aux surfaces d'appui plates à l'extrémité des valves, permettent de mieux soulever et positionner le col de l'utérus.



Lauréat du prix **red dot** Product Design
à deux reprises (2013 et 2016).

A better speculum, a better practice, a better world

Le Standard

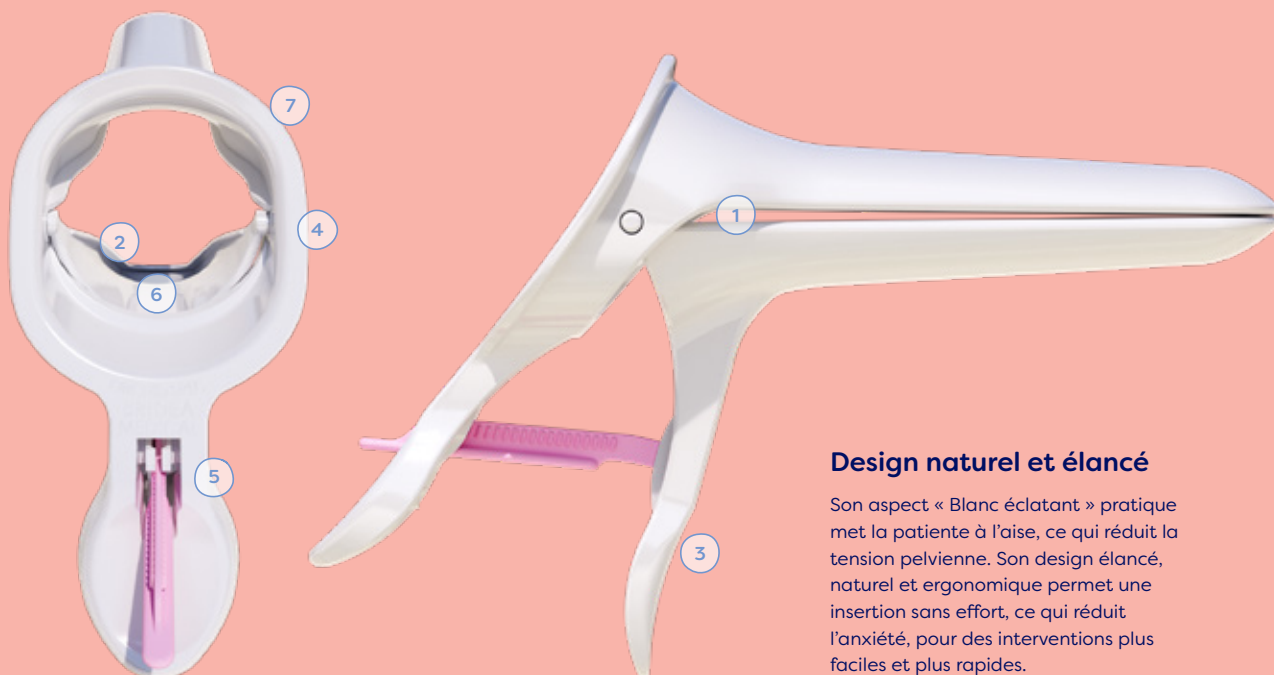

Design naturel et élancé

Son aspect « Blanc éclatant » pratique met la patiente à l'aise, ce qui réduit la tension pelvienne. Son design élancé, naturel et ergonomique permet une insertion sans effort, ce qui réduit l'anxiété, pour des interventions plus faciles et plus rapides.

L'optimisation d'un spéculum

1. Espace anti-pincement

En raison d'un espace important entre les valves, elles ne se touchent pas lors de la fermeture.

2. Moins d'égouttage résiduel

Les bords repliés vers l'intérieur retiennent les fluides ou les écoulements, ce qui implique moins de nettoyage, une hygiène améliorée, des procédures plus rapides.

3. Poignée inclinée vers l'arrière

La poignée inclinée à 105° vers l'arrière permet une plus grande liberté de mouvement, une plus grande plage d'accès et une insertion plus profonde. Les changements de taille sont moins fréquents et les contacts involontaires avec la patiente sont évités.

4. Ouverture 30% plus large

que les spéculums les plus utilisés, ce qui offre une meilleure vision et permet une manipulation plus facile des instruments.

5. Utilisation facile d'une seule main et risque de blocage inexistant

Conçu pour être utilisé d'une seule main, le speculum se verrouille et se déverrouille très facilement. Le dispositif de verrouillage est doté d'un mécanisme de sécurité qui bloque les valves si une force trop importante est appliquée.

6. Surface réfléchissante


La surface blanche réfléchissante dirige davantage de lumière externe vers l'extrémité du spéculum que celle des spéculums transparents ou métalliques. Aucune source de lumière interne n'est nécessaire.

7. Bords repliés vers l'extérieur

Le bord externe replié vers l'extérieur libère l'ouverture de tout tissu et offre une plus grande marge pour la manipulation des instruments, ce qui améliore la visibilité au niveau de la cavité et du col de l'utérus.

« Incassable » selon le NHS

Orchid Spec a été testé au Pays de Galles par l'instance *Surgical Materials Testing Laboratory* (SMTL), une entité du National Health Service (NHS). Ces tests ont confirmé qu'il s'agit du premier spéculum « incassable » et qu'il est donc suffisamment solide pour remplir facilement sa fonction.

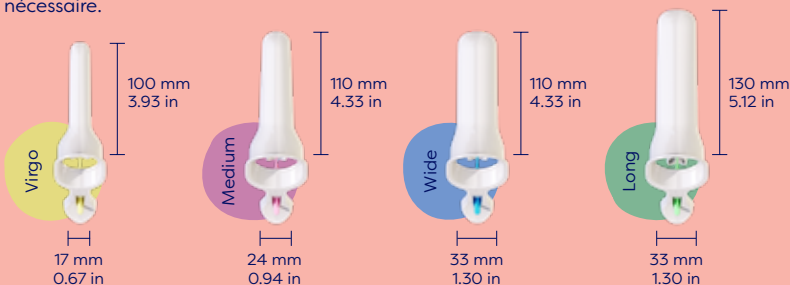

Le Standard comporte quatre tailles. Chacune est disponible dans les teintes appréciées « Blanc éclatant » (blanc) et « Cristallin » (transparent).

Choix d'un spéculum blanc ou transparent ?

Notre spéculum blanc

Réduction des erreurs de diagnostic

Lors d'un diagnostic effectué à l'aide d'un spéculum « transparent » la vision est déformée en raison de la dépression tissulaire locale et de la décoloration des tissus qui en résulte.

Examen amélioré

La surface blanche permet un examen plus rapide et plus précis de la couleur de l'écoulement.

Confort accru pour la patiente

Le blanc est mieux perçu par les patientes en termes de qualité, d'hygiène et de confort. La durée et la qualité d'une intervention sont meilleures lorsque la patiente est moins anxieuse.

95 % de nos clients le préfèrent

Toutefois, nous vendons aussi des spéculums transparents.

Notre spéculum transparent


La version transparente d'Orchid Spec offre un avantage visible en cas d'accès en présence de pathologies plus sérieuses, lors d'hémorragies ou pour l'examen des sutures, notamment après une hystérectomie.

Un environnement préservé

Orchid Spec est le spéculum le plus favorable à l'environnement disponible actuellement. Dès le début, la conception d'Orchid Spec a été axée sur la réduction de l'impact environnemental selon le principe C2C. L'usine de production ultramoderne implantée aux Pays-Bas fonctionne avec un bilan carbone 100 % neutre et a optimisé la gestion des ressources naturelles telles que l'eau et les déchets. Le design et l'emballage du produit ont été optimisés en termes de poids et de volume afin de réduire encore la consommation de matériaux et l'empreinte logistique.

67% de matière plastique en moins
par rapport à la plupart des alternatives plastiques à usage unique

Par rapport aux spéculums jetables les plus utilisés, l'empreinte carbone est réduite de plus de **12x**

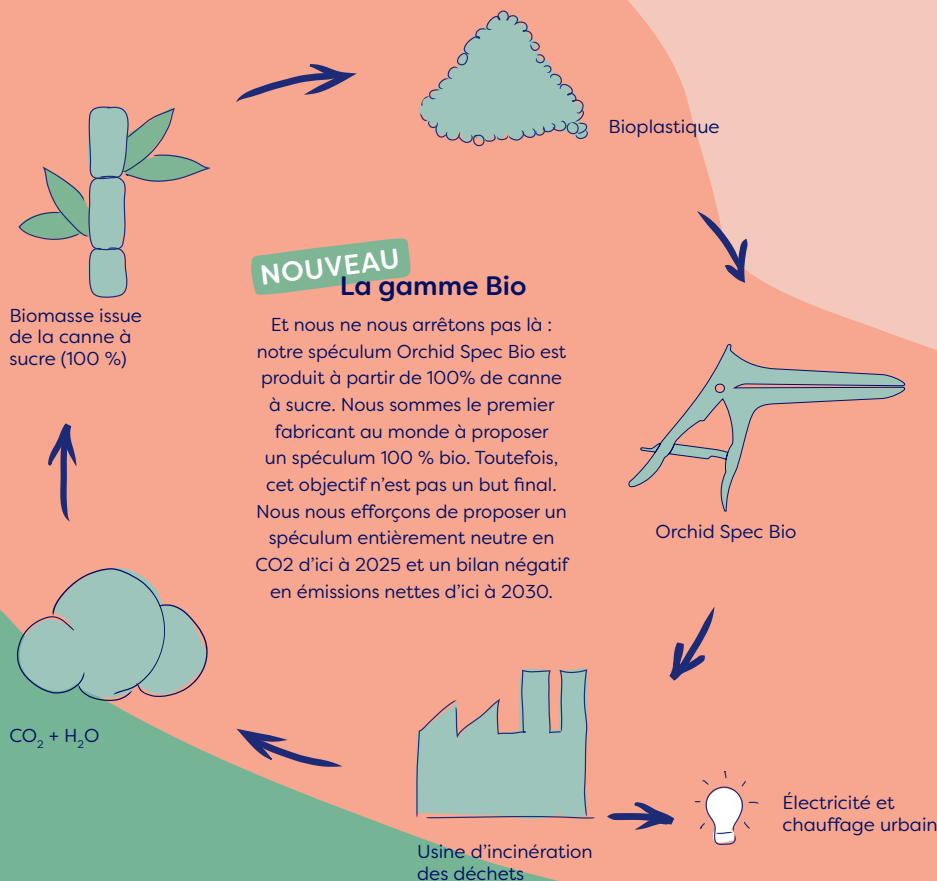

Actuellement, le Bio
est composé de
100%
de canne à sucre

100%
neutre en carbone
d'ici à 2025

**Émissions
nettes
négatives**
d'ici à 2030

Avec Orchid Spec, notre ambition est de rendre les interventions par voie vaginale aussi faciles que possible pour les femmes comme pour les gynécologues du monde entier, tout en aidant Mère Nature. Actuellement, Orchid Spec est le choix le plus écologique. Notre objectif est de devenir neutres en CO2 d'ici à 2025 et d'atteindre des émissions nettes négatives d'ici à 2030.


Tous nos produits sont de conception néerlandaise et fabriqués au Pays-Bas dans des installations de pointe afin de garantir une gestion optimale des ressources naturelles et une réduction des déchets.



Le Standard
Notre spéculum
écologique standard



Le Bio
Fabriqué à partir
de 100% de
canne à sucre

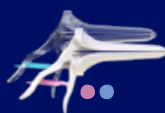

L'Open
Avec ouverture
latérale



Le SPX
Avec système
d'extraction des
fumées



Le SPX Open
Avec ouverture latérale
et système d'extraction
des fumées

A better speculum, a better practice, a better world



Pour toute information ou demande, veuillez prendre contact :
www.orchid-spec.com
enquiry@brideamedical.com

Les produits Orchid Spec sont brevetés et font l'objet d'un dépôt de modèle. Orchid Spec et Bridea Medical sont des marques déposées de Bridea Medical aux Pays-Bas. © 2024 Bridea Medical.